

В Україні зареєстровано і дозволено використовувати більше двох сотень різноманітних дезінфекційних засобів і антисептиків. Та невеликим залишається перелік активно-діючих речовин, що застосовуються у виробництві цих засобів.

Щоб попередити виникнення резистентних штамів мікроорганізмів, появи алергій у персоналу, не витратити коштів дарма, в сучасних умовах користуються схемами періодичної заміни деззасобів з різними активно-діючими речовинами.

*Знищення збудників інфекційних хвороб
в зовнішньому середовищі –
санітарно-епідеміологічного благополуччя*

(044) 568-04-04

(044) 238-02-30

(044) 238-02-31

lavernal@fm.ua

www.laverna.kiev.ua

www.laverna.prom.ua

Київ, вул. Бердичівська, 1 (ст.м. "Лук'янівська")

ЛАВЕРНА
ЧЛЕН АСОЦІАЦІЇ ДЕЗІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ

ТОВ «ЛАВЕРНА» - вітчизняний виробник засобів для хімічної дезінфекції і стерилізації, антисептиків для рук, шкіри та слизових оболонок, офіційний представник в Україні компаній ІП «Інкраслав» (Білорусь), «Цсязин гранд корпорейшн» (КНР). Асортимент продукції ТОВ «ЛАВЕРНА», професійні консультації фахівців, гнучка система знижок та організована доставка задовільняють найвибагливіших клієнтів.



**ЗАСОБИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТА АНТИСЕПТИКИ
В СТОМАТОЛОГІЇ**

**ВИКОРИСТАННЯ
дезінфекційних засобів і антисептиків
в сучасній стоматологічній клініці**

Об'єкти, що підлягають дезінфекції / стерілізації	Назва деззасобу / антисептика	Режим застосування		Склад, активно-діючі речовини
		концентрація, %	експозиція, хв.	
поверхні стоматологічної апаратури,приладів, обладнання, маніпуляційних столиків, столів (установок) для зберігання стерильних матеріалів, тощо	Бігуанідін Фляхе	1,0	10	Г+ Ч
	Дисмозон пур	1,5	15	П
	Інкрасепт	2,0	15	ПГ
	Пероксін	2,0	15	П+ПВ
	Славін Нью (Славін)	0,5	15	ПГ+АГ
	Сурфаніос	0,5	15	А+Ч
	Терралін протект	0,25	15	А+Ч+С
поверхні приміщення (підлога, стіни, стеля), меблі та обладнання поза лікувальною зоною (меблі, двері, шафи, тощо)	Анасепт	1,0	60	ПГ+Ч
	Бігуанідін Фляхе	0,5	60	Г+ Ч
	Брілліант	2,0	30	ГА+Ч
	Дезефект	2,3	60	Ч
	Дисмозон пур	0,25	60	П
	Жавілар Плюс У	0,01	90	ГХ
	Жавілар Ефект У	0,015	60	ГХ
	Інкрасепт	1,0	30	ПГ
	Клінісепт	1,0	60	Ч
	Лізоформін 3000	0,25	60	АГ+Ч
	Мікробак форте	0,5	60	А+Ч
	МедіДес	0,75	60	Ч+СП
	Пероксін	0,5	60	ПГ+ПВ
	Славін Нью (Славін)	0,5	15	ПГ+АГ
	Сурфаніос	0,5	5	А+Ч
	Терралін протект	0,15	60	А+Ч+С
аспіраційні (відсмоктуючі) системи	Анасепт	2,0	90	ПГ+Ч
	Дезефект	2,3	60	Ч
	Інкрасепт	0,75	60	ПГ
	Корзолекс екстра	0,5	60	АФ+АГ+Ч
	Корзолекс плюс	1,0	60	А+Ч
	Пероксін	0,5	60	ПГ+ПВ
	Сурфаніос	0,1	30	А+Ч

Скорочені умовні позначення активно-діючих речовин

- галогени

- альдегіди

- поверхнево-активні речовини (ПАВи)

- перекисні сполуки

- кислоти

- аміни

- спирти

- комбіновані
- хлор (ГХ), йод (ГЙ)

- глутаровий (АГ), ортофталевий (АО), формальдегід (АФ), бурштиновий (АБ), гліоксаль (АГл)

- (Ч), гуанідіни (Г), полігуанідіни (ПГ)

- перекис водню (ПВ), надкислоти (НК), інші (П)

- оцтова (Ко), молочна (Км), лимонна (Кл)

- третинні аміни (А)

- етиловий (СЕ), пропаноли (СП), ізопропіловий (СІ), бутиловий (СБ), інші (С)

- різноманітні композиції вказаних активних речовин

ЙОДІСКІН

- сучасний на основі повідон – йоду надійний антисептик для знезараження шкіряних покривів і слизових, операційного поля,альтернативний засіб для гігієнічної та хірургічної обробки рук
- іони йоду виділяються із полімерного матрекса поступово, насичуючи глибокі слої шкіри і слизових, забезпечуючи пролонговану знезаражуючу дію
- не подразнює шкіри і слизові
- не обпікає слизові навіть при довготривалій дії
- чітко маркірує операційне поле
- майже не фарбує пластинки нігтів, зуби та десна. Фарбування зникає через 5- 10 хв.
- не забруднює білизну
- прискорює заживлення ран, опіків, швів
- використовується як антисептик в місцевому лікуванні запальних процесів
- економний – застосовується в нативному вигляді та в розведеннях, в особливості при промиваннях



Антисептики

ІНОЛ

- надійне знезараження перевіреним століттями антисептиком, етиловим спиртом, дія якого посилена додатковим активним компонентом, ізопропиловим спиртом
- гігієнічна,хірургічна обробка рук, антисептика шкіряних покривів перед медичними маніпуляціями
- найменший ризик виникнення алергій та подразнень. Застосування високо очищеного, найбільш безпечного по токсикології серед спиртів – етилового
- гарантований антимікробний ефект - концентрація етилового спирту 72,0%-75,0%, що пролонгований у часі
- покращує еластичність, пружність шкіри за рахунок спеціальних добавок, що особливо важливо при частому та тривалому застосуванні та роботі в гумових рукавичках
- доступна вартість засобу при високій якості
- зручні різноманітні упаковки



АКВІН

- не токсичний для організму людини безспиртовий антисептик для шкіри та слизових на основі якісно нової активної речовини - полігексаметилenguанідину фосфату
- ефективний проти:
 - бактерій, включаючи збудників туберкульозу
 - вірусів,включаючи збудників СНІДу, вірусних гепатитів, грипу, герпетичної інфекції, кишкових вірусних інфекцій
 - грибків
- достойна альтернатива йодвмісним, спиртовим засобам, хлоргекседину та іншим антисептикам
- тривалий контакт з поверхнями, що обробляються забезпечує та посилює пролонгований антимікробний захист
- найменший ризик виникнення алергій та подразнень
- не знежирює шкіряні покриви та не пересушує їх, не обпікає слизові
- не всмокнується через слизові, шкіру і рани
- без кольору, не фарбує зуби та десну, не перешкоджає візуальному обстеженню, не забруднює білизну
- не вміщує ланолін та гліцеринів, що понижують звернення крові
- покращує та прискорює заживлення ран, опіків, післяопераційних швів
- резистентних до засобу мікроорганізмів на сьогодні не виявлено
- використовується як антисептик в місцевому лікуванні запальних процесів
- економний, застосовується у вигляді концентрату та в розведеннях, особливо для промивань
- зручні різноманітні упаковки



Об'єкти, що підлягають дезінфекції / стерлізації	Назва деззасобу / антисептика	Режим застосування		Склад, активно-діючі речовини
		концентрація, %	експозиція, хв.	
предмети догляду за хворими, пацієнтами, фартухи з полімерних матеріалів, покриття з клейонки, предметне скло, захисні щитки, окуляри, плювальниці, тощо	Дескозал	0,5	30	АГл + Ч
	Дисмозон пур	0,25	60	П
	Жавілар Плюс У	0,1	60	ГХ
	Жавілар Ефект У	0,1	60	ГХ
	Інкрасепт	0,75	60	ПГ
	Лізоформін 3000	0,25	60	АГ+Ч
	Мікробак форте	0,5	60	А+Ч
	МедіДес	0,75	60	Ч+СП
	Пероксін	0,5	60	ПГ+ПВ
	Славін Нью (Славін)	0,5	15	ПГ+АГ
	Сурфаніос	0,1	30	А+Ч
	Терралін протект	0,15	60	А+Ч+С
санітарно-технічне обладнання (раковини, ванни, унітази), тощо	Анасепт	2,0	60	ПГ+Ч
	Бігуанідін Фляхе	0,5	60	Г+ Ч
	Брілліант	2,0	60	ГА+Ч
	Дезефект	2,3	60	Ч
	Дескозал	0,5	30	АГл Ч
	Жавілар Плюс У	0,06	60	ГХ
	Жавілар Ефект У	0,06	60	ГХ
	Інкрасепт	1,0	30	ПГ
	Клінісепт	1,0	60	Ч
	Клорсепт-25	0,06	60	ГХ
	Лізоформін 3000	0,5	60	АГ+Ч
	Лізоформін 3000	0,25	60	АГ+Ч
	Мікробак форте	0,5	60	А+Ч
	МедіДес	0,75	60	Ч+СП
	Пероксін	0,5	60	ПГ+ПВ
	Славін Нью (Славін)	0,5	15	ПГ+АГ
	Сурфаніос	0,05	60	А+Ч
	Терралін протект	0,15	60	А+Ч+С
	Хлорантоін	0,2	60	ГХ
малогабаритні предмети, вузли медичного обладнання та оснащення (прямі та турбінні стоматологічні накінечники, тощо), невеликі за розміром поверхні (маніпуляційний столик під час роботи лікаря, тощо)	Аеродезин 2000	100,0	5	СП+ СЕ
	Бацилол АФ / рідина, серветки	100,0	0,5	СП+ СЕ
	Дескосепт АФ / рідина, серветки	100,0	2	СЕ+Ч
	КвікДес / рідина, серветки	100,0	1	СЕ+Ч
	Мікроцид АФ / рідина, серветки	100,0	2	СП+ СЕ
	Сурфа'Сейф / пінний засіб	0,5	15	ПГ+Ч

Об'єкти, що підлягають дезінфекції / стерілізації	Назва деззасобу / антисептика	Режим застосування		Склад, активно-діючі речовини
		концентрація, %	експозиція, хв.	
вироби медичного призначення індивідуальних стоматологічних наборів (лоток, пінцет, зонди, гладилки, елеватор, шпатель), інші стоматологічні інструменти	Аніозім ДД1	0,5	15	ПГ+Ч
	Брілліант	2,0	60	ГА+Ч
	Гігасепт ФФ нью	3,0	60	АБ
	Гігасепт Інстру АФ	0,1	60	Г+СП
	Деканаль	0,5	30	АГ+Ч
	Дескотон форте	1,0	60	АГ+АФ
	Інкрасепт	0,75	60	ПГ
	ІнструБорДес	1,0	60	А+Ч
	Корзолекс базік	1,0	30	АФ+АГ
	Корзолекс екстра	0,5	60	АФ+АГ+Ч
	Корзолекс плюс	1,0	60	А+Ч
	Лізоформін 3000	0,25	60	АГ+ Ч
	Перфектан Ендо	1,0	60	Г+Ч
	Славін Нью (Славін)	0,5	15	ПГ+АГ
	Секусепт актив	1,0	60	П
обертові стоматологічні інструменти	СТЕН	100,0	5	АГ
	Деско Борербад	2,0	15	ПГ+ПВ
	ІнструБорДес	100,0	15	П+СП
	Інкрасепт	3,0	15	А+Ч
	Корзолекс екстра	2,0	15	ПГ
	Корзолекс плюс	1,0	15	АФ+АГ+Ч
	Славін Нью (Славін)	3,0	15	А+Ч
стоматологічні дзеркала	Сурфаніос	0,5	15	ПГ+АГ
	Аніюксід 1000	0,5	5	А+Ч
	Гігасепт ФФ нью	100,0	10	НК
	Дескотон форте	3,0	60	АБ
	Корзолекс базік	1,0	60	АГ+АФ
	Славін Нью (Славін)	2,0	60	АФ+АГ
	СТЕН	2,0	10	ПГ+АГ
	Секусепт актив	2,0	15	ПГ+ПВ
	СТЕН	1,0	60	П
стоматологічні дзеркала	СТЕН	100,0	10	АГ
	Аніюксід 1000	100,0	10	АГ
	Гігасепт ФФ нью	100,0	10	АГ
	Дескотон форте	100,0	10	АГ
	Корзолекс базік	100,0	10	АГ
	Славін Нью (Славін)	100,0	10	АГ
	СТЕН	100,0	10	АГ
	Секусепт актив	100,0	10	АГ

Універсальні дезінфекційні засоби

СЛАВІН, СЛАВІН НЬО

- безпечний засіб для проведення дезінфекції високого рівня, у т.ч. під час генеральних прибирань в приміщеннях з особливими вимогами до протиепідемічного режиму
- оригінальна комбінація стабілізованого глутарового альдегіду з ПГМГ гідрохлоридом, доповнене миючим комплексом, синергічна взаємодія компонентів дозволила знизити вміст хімічних речовин в робочих розчинах засобу, що значно зменшило навантаження на персонал і навколишнє середовище, та зменшило вартість
 - повний спектр знезаражувальної дії
 - універсальність: для знезараження та миття, у т.ч. достерилізаційного очищення
 - не токсичний для людей. Глутаровий альдегід зв'язаний ПГМГ гідрохлоридом та не виділяється в повітря. Засіб віднесено до 4 класу малонебезпечних речовин на відміну від інших альдегідвмісних препаратів
 - екологічна безпечність. Доза глутарового альдегіду значно нижча за допустиму
 - має короткий термін експозиції (15 хв.)
 - стабільний при зберіганні. Можливий термін зберігання робочих розчинів 14 діб
 - легко змивається з поверхонь, не фіксує органічні забруднення, підходить для знезараження обертових стоматологічних інструментів
 - зберігає антимікробні властивості після розморожування внаслідок замерзання
 - економія матеріальних ресурсів внаслідок застосування



ІНКРАСЕПТ

- універсальний засіб для знезараження різноманітних об'єктів, оптимальна комбінація активно-діючої речовини полігексаметиленгуанідину гідрохлорид (ПГМГ гідрохлорид) з іншими функціональними компонентами, що забезпечує високу біоцидну активність та гарні споживчі якості
- суміщені процеси дезінфекції та миття, у т.ч. достерилізаційне очищення
 - ефективний проти бактерій, грибків, вірусів
 - забезпечує найменший ризик для здоров'я персоналу, хворих, пацієнтів, відвідувачів, не накопичується в організмі та не викликає токсичних змін в органах і системах, не викликає алергій, робочі розчини не подразнюють шкіри і слизових
 - найвища екологічна безпечність складових препаратів - ПГМГ гідрохлорид повністю розкладається до екологічно безпечних речовин
 - застосовується і для знезараження продуктів харчування (яйця, овочі, фрукти)
 - стабільний при зберіганні (можливий термін зберігання робочих розчинів 14 діб)
 - має приємний запах, легко змивається з поверхонь
 - марки засобу зі зниженим піноутворенням застосовуються для знезараження аспіраційних (відсмоктуючих) систем
 - економія робочого часу, наявність короткого терміну експозиції – 15 хв.
 - доступна ціна засобу та його робочих розчинів
 - розфасований в різноманітні упаковки



Скорочені умовні позначення активно-діючих речовин

- галогени
- альдегіди
- поверхнево-активні речовини (ПАВи)
- перекисні сполуки
- кислоти
- аміни
- спирти
- комбіновані
- хлор (ГХ), йод (ГЙ)
- глутаровий (АГ), ортофталевий (АО), формальдегід (АФ), бурштиновий (АБ), гліоксаль (АГл)
- (Ч), гуанідини (Г), полігуанідини (ПГ)
- перекис водню (ПВ), надкислоти (НК), інші (П)
- оцтова (Ко), молочна (Км), лимонна (Кл)
- третинні аміни (А)
- етиловий (СЕ), пропаноли (СП), ізопропіловий (СІ), бутиловий (СБ), інші (С)
- різноманітні композиції вказаних активних речовин



Об'єкти, що підлягають дезінфекції / стерлізації	Назва деззасобу / антисептика	Режим застосування		Склад, активно-діючі речовини
		концентрація, %	експозиція, хв.	
термолабільні стоматологічні інструменти	Аніоксід 1000	100,0	30	НК
	Гігасепт ФФ нью	10,0	300	АБ
	Деканалъ	1,0	60	АГ+Ч
	Дескотон форте	6,0	120	АГ+АФ
	Корзолекс базік	5,0	240	АФ+АГ
	Корзолекс екстра	4,0	120	АФ+АГ+Ч
	Лізоформін 3000	8,0	60	АГ+Ч
	Перфектан Ендо	3,0	180	Г+Ч
	СТЕН	5,0	240	ПГ+ПВ
	Секусепт актив	1,0	60	П
	Стераніос 2%	100,0	60	АГ
зуботехнічні інструменти та вироби (відтиски з різноманітних матеріалів, відтисні ложки, коронки, артикулятори, тощо)	Анасепт	2,0	90	ПГ + Ч
	Аніозім ДД1	0,5	15	ПГ+Ч
	Дезефект	2,3	60	Ч
	Дисмозон пур	0,25	60	П
	Інкрасепт	0,75	60	ПГ
	Корзолекс екстра	0,5	60	АФ+АГ+Ч
	Корзолекс Плюс	1,0	60	А+Ч
	Славін Нью (Славін)	0,5	15	ПГ+АГ
	СтарСепт	100,0	5	Ч
	Сурфаніос	0,5	5	А+Ч
посуд, білизна, забруднені біологічними рідинами	Анасепт	2,0	120	ПГ + Ч
	Бланідас	0,2	60	ГХ
	Дезактін	0,2	60	ГХ
	Брілліант	2,0	60	ГА+Ч
	Жавілар Плюс У	0,2	120	ГХ
	Жавілар Ефект У	0,2	120	ГХ
	Інкрасепт	1,0	30	ПГ
	Клорсепт-25	0,15	120	ГХ
	Неохлор	0,5	60	ГХ
	Пероксін	0,5	60	ПГ +ПВ
	Славін Нью (Славін)	0,5	15	ПГ+АГ
	Сурфаніос	0,25	60	А+Ч
	Терралін протект	0,15	60	А+Ч+С
	Хлорантоын	0,2	60	ГХ

Об'єкти, що підлягають дезінфекції / стерлізації	Назва деззасобу / антисептика	Режим застосування		Склад, активно-діючі речовини
		концентрація, %	експозиція, хв.	
прибиральний інвентар, відпрацьовані вироби медичного призначення одноразового використання, одноразові плювальниці, склянки, гумові рукавички, перев'язувальний матеріал, тощо	Бланідас	0,2	60	ГХ
	Дезактін	0,2	60	ГХ
	Дескозал	0,5	60	АГл+Ч
	Жавілар Плюс У	0,2	120	ГХ
	Жавілар Ефект У	0,2	120	ГХ
	Клорсепт-25	0,15	120	ГХ
	Неохлор	0,15	60	ГХ
	Пероксін	0,5	60	ПГ +ПВ
	Славін Нью (Славін)	0,5	15	ПГ+АГ
	Хлорантоін	0,2	60	ГХ
біологічні виділення (гнійні виділення, кров), змивні води після ополіскування ротової порожнини, тощо	Бланідас	0,2	90	ГХ
	Дезактін	0,2	90	ГХ
	Жавілар Плюс У	0,2	120	ГХ
	Жавілар Ефект У	0,2	120	ГХ
	Клорсепт-25	0,2	120	ГХ
	Мікробак форте	0,5	60	А+Ч
	Хлорантоін	0,2	90	ГХ
гігієнічна дезінфекція рук хірургічна дезінфекція рук (знезараження рук стоматологів-хірургів, медичних сестер та іншого персоналу, задіяного в оперативних втручаннях, у т.ч., видаленні зубів	Аквін	для гігієнічної дезінфекції антисептики використовуються в нерозведеному вигляді шляхом втирання не менше 3 мл засобу в сухі руки		ПГ
	Аніос-гель			СЕ
	АХД 2000			СЕ
	БактеріоСол S (стерил)			СП
	ІзАсептик			СІ+С+Ч
	Інол			СЕ+СІ
	Йодіскін	для хірургічної дезінфекції антисептики використовуються в нерозведеному вигляді шляхом втирання (не менше 2-х разів) в шкіру рук та передпліч. При цьому антисептик ретельно наноситься на всі ділянки за загальноприйнятою схемою, шкіра під час знезараження повинна бути повністю зволожена		ГІ
	Кутасепт Г (кольор)			СП+Ч
	Кутасепт Ф			СП+Ч
	Сенсіва			СП+Км
	Септодерм			СП+СБ
	Стериліум гель			СП+ ЧАС
	Стериліум			СП+ ЧАС
антисептична обробка слизових, у т.ч., ротової порожнини, перехідного епітелію, шкіри перед- та після оперативних втручань, обробка швів, ран, опіків, антисептика кореневих каналів, місцеве лікування та профілактика інфекційних захворювань ротової порожнини	Аквін	100,0 20,0 - 50,0 при промиванні, ополіскуванні	0,5 - 1,0	ПГ
	Йодіскін	100,0 50,0 при промиванні, ополіскуванні	0,5 - 1,0	ГІ

Скорочені умовні позначення активно-діючих речовин

- галогени

- альдегіди

- поверхнево-активні речовини (ПАВи)

- перекисні сполуки

- кислоти

- аміни

- спирти

- комбіновані
- хлор (ГХ), йод (ГЙ)

- глутаровий (АГ), ортофталевий (АО), формальдегід (АФ), бурштиновий (АБ), гліоксаль (АГл)

- (Ч), гуанідіни (Г), полігуанідіни (ПГ)

- перекис водню (ПВ), надкислоти (НК), інші (П)

- оцтова (Ко), молочна (Км), лимонна (Кл)

- третинні аміни (А)

- етиловий (СЕ), пропаноли (СП), ізопропіловий (СІ), бутиловий (СБ), інші (С)

- різноманітні композиції вказаних активних речовин

Об'єкти, що підлягають дезінфекції / стерлізації	Назва деззасобу / антисептика	Режим застосування		Склад, активно-діючі речовини
		концентрація, %	експозиція, хв.	
ін'єкційне, операційне поле	Аквін	100,0	1-2	ПГ
	Інол	100,0	1-2	СЕ+СІ
	Йодіскін	100,0	1-2	ГІ
	Кодан Форте	100,0	1-10	СП+ПВ
	Кутасепт Г (кольор)	100,0	1-10	СП+Ч
	Кутасепт Ф	100,0	1-10	СП+Ч
	Сенсіва	100,0	2-10	СП+Км
	Септодерм (забарвл)	100,0	1-5	СП+СБ
	Стериліум	100,0	1-10	СП+ Ч
	Стериліум Класік пур	100,0	1-10	СП+ Ч

Примітка:

при плануванні закупівлі засобів для проведення дезінфекції в своєму закладі Ви можете вибирати любий дезінфектант із запропонованих чи використати інший, дозволений до застосування МОЗ України.